

かんたん設定ガイド

本書は、本製品をお買い上げ後、すぐにお使いいただけるまでの設定を説明しています。
本製品の操作については別紙の「操作ガイド編」を、詳しい使いかたについては「オンラインマニュアル」をご確認ください。右の二次元バーコードからご確認ください。




Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社オーディオテクニカは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

ATMM-SHD1 132902150-01-02 ver.1 2025.05.01 ver.2 2025.06.15


1 準備をしましょう

同梱品を確認し、充電、お使いのスマートフォンとのペアリングを行います。


1 同梱品を確認します

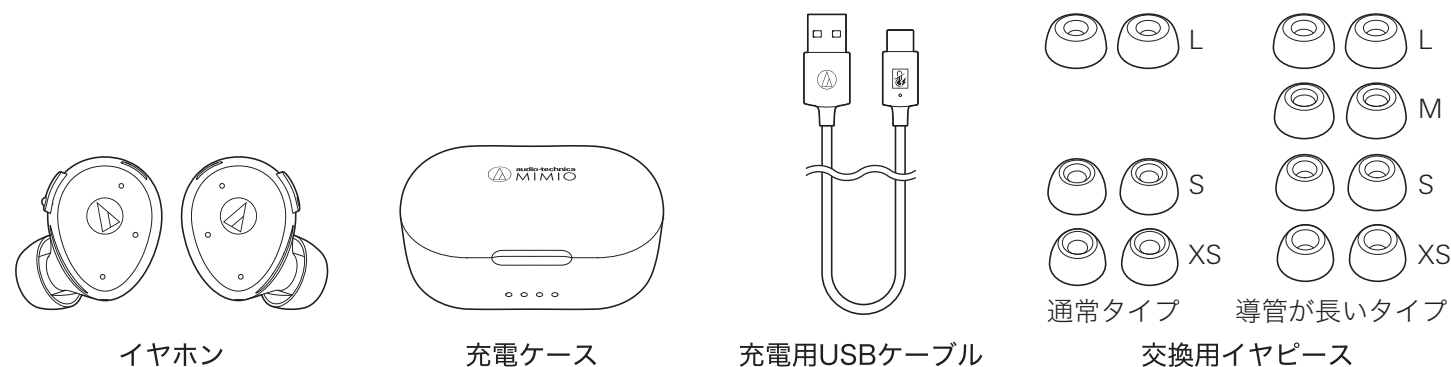

●ご使用の前に
イヤホンの保護シートと絶縁シールを剥がしてください。

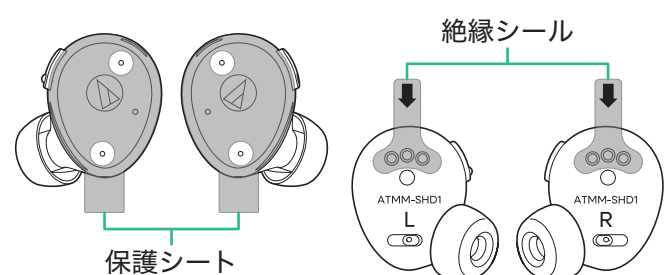


導管の長さが異なる2種類・4サイズが付属しています。
通常タイプのMサイズは、イヤホンに装着されています。

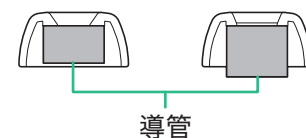


2 イヤホンの装着具合を確認します

“L”の表示があるイヤホンを左耳に、“R”の表示があるイヤホンを右耳に装着します。
イヤホンの操作ボタンが上側にくるように装着し、耳にフィットするかどうかを確認します。

操作ボタンが上側にくるように装着します


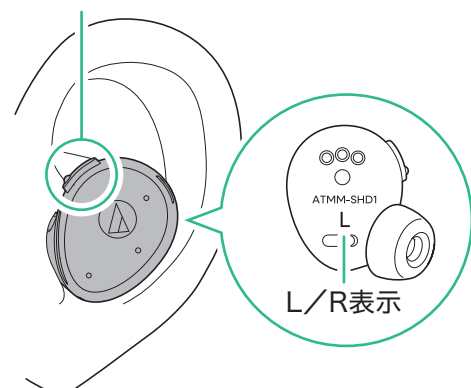


●イヤピースが耳にフィットしない場合
付属の交換用イヤピースからお好みのタイプ・サイズに付け替えてください。

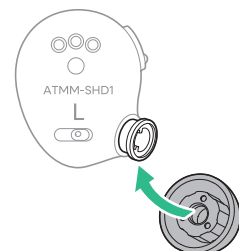


3 充電ケース・イヤホンを充電します

初めてご使用になる場合は、イヤホンを充電ケースに収納して充電を行ってください。

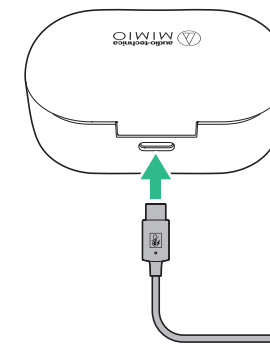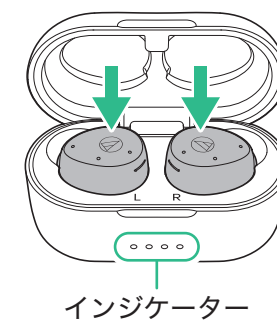

●充電時のインジケータ表示

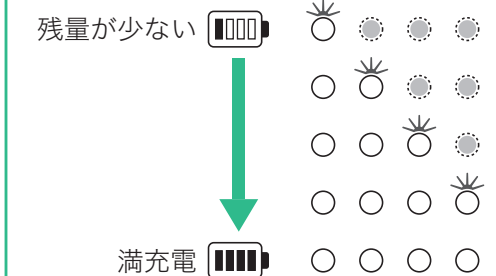

充電用USBケーブルを市販のUSB電源アダプター（USB Type-A対応）に接続します。

市販のUSB電源アダプター（付属していません）

4 スマートフォンとペアリングします

イヤホンとお使いのスマートフォンをBluetooth接続します。

iPhone（アイフォーン）をご使用の場合


iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています。



裏面に続きます

Android(アンドロイド)スマートフォンをご使用の場合

Android、Google Play は Google LLC の商標です。

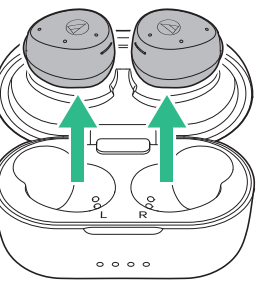

イヤホンを取り出すと、自動的に電源が入ります。



「設定」>「接続設定」をタッチします。

「新しいデバイスとペア設定」をタッチします。

「MIMIO ASSIST ONE」または「LE_ASSIST ONE」をタッチします。

「ペア設定する」をタッチします。

3 聴力レベルを測定・調整します

画面の表示に従って操作を行ってください。



「次へ」をタッチします。

「誕生日」「性別」を選択し、「次へ」をタッチします。

「次へ」をタッチします。

音声の録音を許可する画面が表示される場合は許可します。


2 アプリで設定をしましょう

当社専用アプリの「Connect」をお使いのスマートフォンにインストールし、イヤホンの設定を行います。アプリで聴力レベルの測定・調整を行ってから使用してください。測定・調整を行わないと、自分に合った設定でイヤホンを使うことができません。

1 「Connect」をインストールします



CONNECT App
iOS, Android

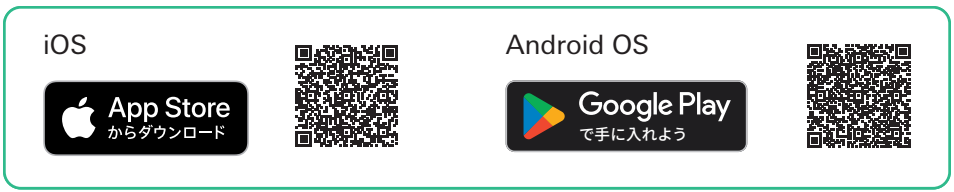

2 アプリの初期設定をします



イヤホンを耳に装着し、スマートフォンの「Connect」のアプリアイコンをタッチします。



画面の表示に従って操作します。

この画面が表示されたら、初期設定の完了です。

おすすめの設定に進んで、カラー選択まで行います。

「結果を保存する」をタッチします。

「完了」をタッチします。

ホーム画面が表示されます。

イヤホンの初期設定から聴力レベルの測定・調整が完了しました。このあとの操作方法については、別紙の「取扱説明書」の「操作ガイド編」をご確認ください。